


AmbiJet SYSTEM

Gebrauchsanweisung

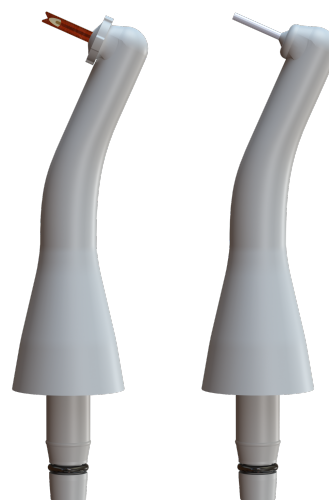

periSlide

inDrive

Artikelnummer:	AmbiJet Version V8
Herstelljahr:	2023
Kontaktinformation des Herstellers:	Schwester-Adolfa-Weg 34, 79115 Freiburg im Breisgau (GERMANY) info@frmed.de www.frmed.de
Gebrauchsanweisung	V4.2
Datum der letzten Revision	2024-MÄRZ-06



0044

Reg.-Nr. BS-MDR-095.21.01

Kurzanleitung

Auf die folgende Seite finden Sie eine Kurzanleitung des AmbiJets



Kurzanleitung AmbiJet v8

Dieses Gerät ist mindestens unter den folgenden Bedingungen sicher:

- Nur vom zahnmedizinischen Fachpersonal
- Nur für Innengebrauch

Installation

01

Reinigen Sie die Basisstation und das Handstück per Wischdesinfektion



02

Stecken Sie das Netzkabel in die Basisstation & in die Steckdose ein



Das Kabel darf nicht gespannt sein


03

Fußschalter auf den Boden platzieren und Magnetkupplung an die Basisstation anbringen



04


Gaskartusche einschrauben

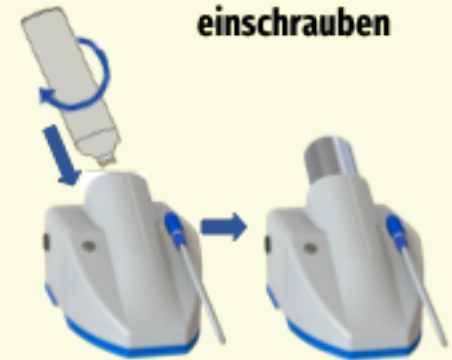

Vorbereitung


01

Nehmen Sie den Applikator und die Lanzette aus den jeweiligen Sterilverpackungen heraus

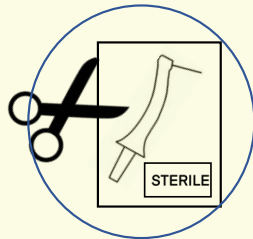


02

Reinigen Sie den Konnektor per Wischdesinfektion

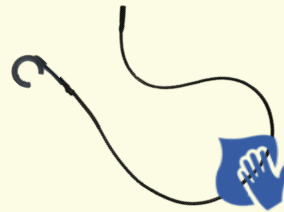

03

Schieben Sie den Konnektor an das Handstück

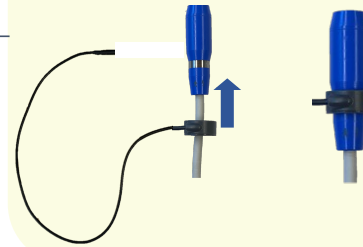


04

Stecken Sie den Applikator in das Handstück bündig ein




05

Schließen Sie die Lanzette in den Konnektor ein

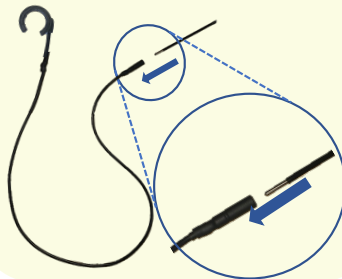

06

Gerät einschalten

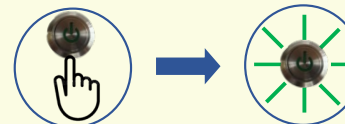

Der Ein/Aus-Schalter leuchtet im Normalfall dauerhaft grün

Anwendung

01

Setzen Sie den Absaugsystem im Mund des Patienten ein.




02

Kontaktieren Sie die Lanzette mit dem Implantat




03

Führen Sie den Applikator zum Implantat

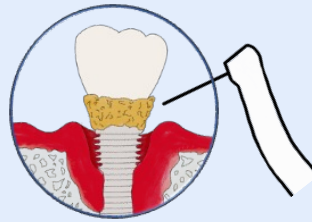


04

Drücken Sie das Fußschalter

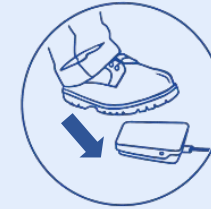


05

Bewegen Sie langsam den Applikator über den Zahnimplantat.

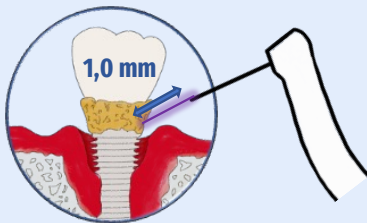

Der optimale Arbeitsabstand beträgt 1,0 mm


Die optimale Vorschubgeschwindigkeit ist 1 mm/sek

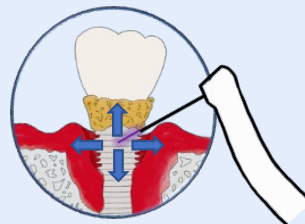

Das Plasma soll mindestens einmal längs und einmal quer über den gesamten Anwendungsort bewegt worden sein.

06


Wenn fertig, schalten Sie das Plasma aus, indem Sie den Fußschalter loslassen.

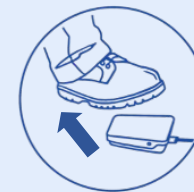

Nachbereitung

01


Schalten Sie das Gerät aus

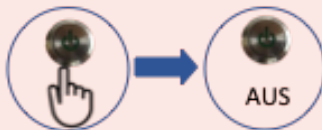

Der Ein/Aus Schalter
wird dunkel


02

**Entkoppeln und entsorgen
Sie den Applikator**

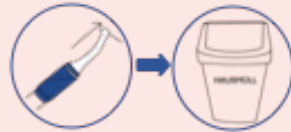

03

**Entkoppeln Sie den
Konnektor von dem
Handstück**

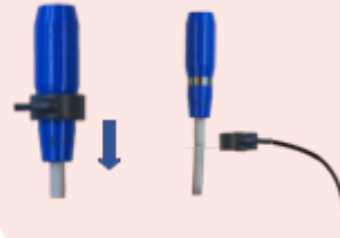

04

**Wischdesinfizieren Sie
Handstück & Basisstation**




05

**Legen Sie das Handstück in
seine Halterung an der
Basisstation zurück**



06

**Entkoppeln Sie die Lanzette
von dem Konnektor**

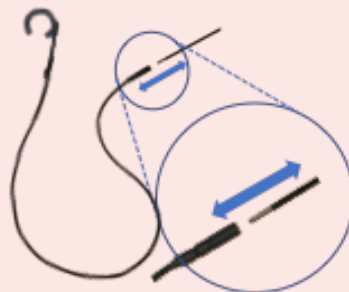

07

**Reinigen Sie den Konnektor
per Wischdesinfektion**



08


**Reinigen Sie die Lanzette,
wie vom Hersteller
beschrieben wird.**



Nach der Behandlung


01

Schrauben Sie die Gaskartusche raus.

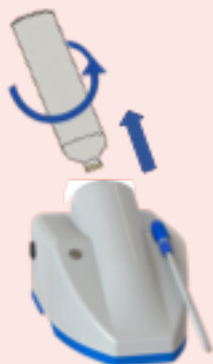

02

Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und aus der Basisstation

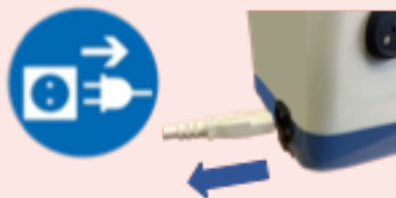

03

Entkoppeln Sie den Kabel des Fußschalters von der Basisstation

