

# Kurzanleitung AmbiJet inDrive



- Nur vom zahnmedizinischen Fachpersonal
- Verwenden Sie nur originale Komponente

# Installation

**01**

**Reinigen Sie die Basisstation und das Handstück per Wischdesinfektion**



**02**

**Stecken Sie das Netzkabel in die Basisstation & in die Steckdose ein**



**Das Kabel darf nicht gespannt sein**


**03**

**Fußschalter auf den Boden platzieren und Magnetkupplung an die Basisstation anbringen**



**04**

**Gaskartusche einschrauben**

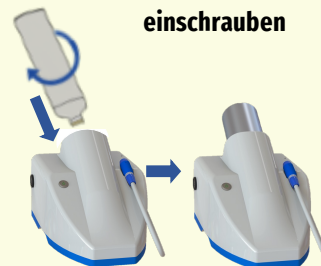


| Produkt      | Produktname                    | Ref./Art-Nr.  | Hersteller                     |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Basisstation | AmbiJet                        | 4262438850015 | Freiburger Medizintechnik GmbH |
| Applikator   | inDrive                        | 4262438850077 | Freiburger Medizintechnik GmbH |
| Gaskartusche | Alumini® 70 Helium 5.0         | A03980702003  | Westfalen                      |
| Lanzette     | Koagulationselektrode, Fig. 31 | 80-461-31-04  | KLS Martin SE                  |
|              | Koagulationselektrode, Fig. 31 | 300/31 47009  | Otto Leibinger GmbH            |
|              | Feilenlanzette Raypex          | V040141000518 | VDW GmbH                       |

# Vorbereitung


01

Nehmen Sie den Applikator und die Lanzette aus den jeweiligen Sterilverpackungen heraus

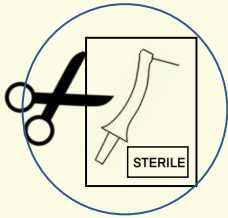


02

Reinigen Sie den Konnektor per Wischdesinfektion

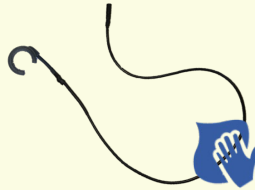


03

Schieben Sie den Konnektor an das Handstück

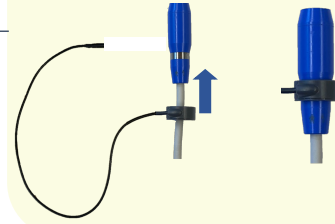


04

Stecken Sie den Applikator in das Handstück bündig ein

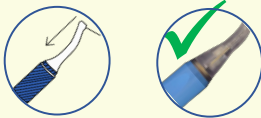


05

Schließen Sie die Lanzette in den Konnektor ein

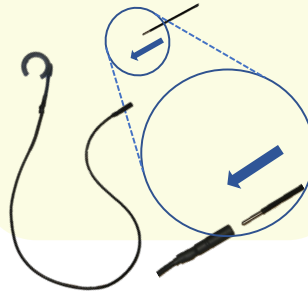

06

Gerät einschalten

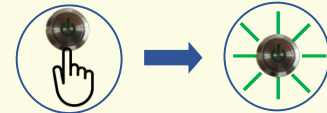

Der Ein/Aus-Schalter leuchtet im Normalfall dauerhaft grün

# Anwendung


01

Setzen Sie den Absaugsystem im Mund des Patienten ein.



02


Kontaktieren Sie die Lanzette mit dem Implantat

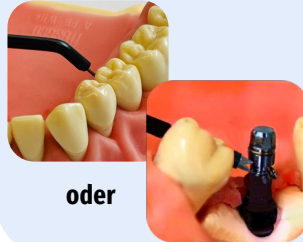

oder

03

Führen Sie den Applikator zum Implantat

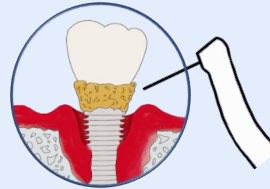


04

Drücken Sie den Fußschalter




05

Bewegen Sie langsam den Applikator über den Zahnimplantat.

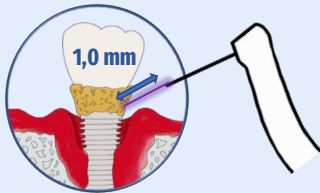

Der optimale Arbeitsabstand beträgt 1,0 mm


Die optimale Vorschubgeschwindigkeit ist 1 mm/sek

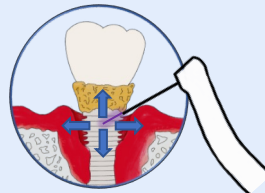

Das Plasma soll mindestens einmal längs und einmal quer über den gesamten Anwendungsort bewegt worden sein.

06


Wenn fertig, schalten Sie das Plasma aus, indem Sie den Fußschalter loslassen.

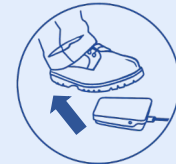

# Nachbereitung

01


**Schalten Sie das Gerät aus**

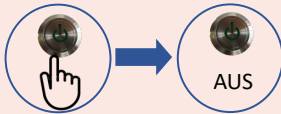

**Der Ein/Aus Schalter  
wird dunkel**


02

**Entkoppeln und entsorgen  
Sie den Applikator**

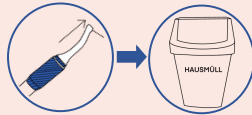

03

**Entkoppeln Sie den  
Konnektor von dem  
Handstück**

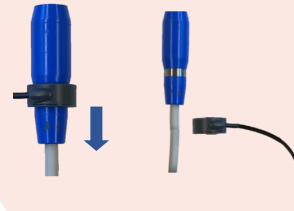


04

**Wischdesinfizieren Sie  
Handstück & Basisstation**




05

**Legen Sie das Handstück in  
seine Halterung an der  
Basisstation zurück**

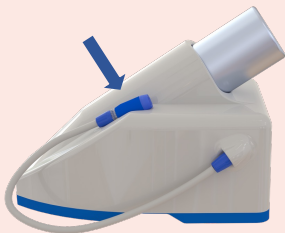


06

**Entkoppeln Sie die Lanzette  
von dem Konnektor**

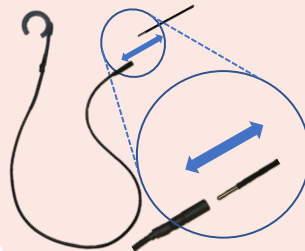


07

**Reinigen Sie den Konnektor  
per Wischdesinfektion**

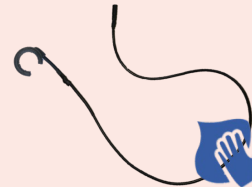

08


**Reinigen Sie die Lanzette,  
wie vom Hersteller  
beschrieben wird.**

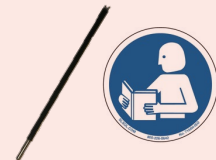

# Nach der Behandlung


01

**Schrauben Sie die Gaskartusche raus.**

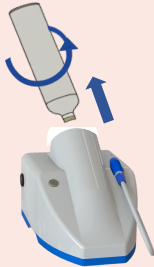

02

**Entfernen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und aus der Basisstation**

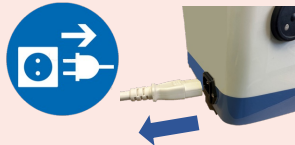

03

**Entkoppeln Sie den Kabel des Fußschalters von der Basisstation**



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kontaktinformation des Herstellers: | Schwester-Adolfa-Weg 34, 79115 Freiburg im Breisgau (Deutschland)<br>info@frmed.de   www.frmed.de |
| Kurzanleitung                       | V1.0  |
| Datum der letzten Revision          | 2024-JAN-13   |
| Sprache                             | Deutsch   |

CE

0044

Reg.-Nr. BS-MDR-095.21.01